

# PASSANTE®

PATENTE NºMU8001592-1

Prancha com sistema rolante e deslizante  
para transferência de pacientes de uma  
superfície para outra.

Praticidade e segurança

**Mínimo esforço**



PASSANTE®

# MANOBRAS BÁSICAS

1

Posicionar o paciente em decúbito lateral, colocando o PASSANTE<sup>®</sup> sob o lençol móvel, o mais embaixo possível do paciente, de forma que o mesmo fique com mais da metade do corpo sobre o PASSANTE<sup>®</sup>.



2

Com o paciente deitado sobre o PASSANTE<sup>®</sup>, enquanto uma pessoa puxa o paciente pelo lençol, a outra ajuda empurrando-o, junto com o lençol, para a outra superfície.



3

Assim que o paciente estiver sobre a outra superfície desejada, posicioná-lo em decúbito lateral, retirando o PASSANTE<sup>®</sup>.



4

O PASSANTE<sup>®</sup> poderá ser transportado à tira-colo, quando tiver que ser levado para as diversas unidades do hospital.



## ■ DESCRIÇÃO TÉCNICA :

“Prancha confeccionada em polímero expandido de formato retangular, dobrável, desmontável e lavável, com dimensões 170 cm. de comprimento X 50 cm. de largura X 2 cm. de altura, revestida por material teflonado, dotada de ponteiros que revestem as suas extremidades, com alças para o transporte e sustentação, sendo que a prancha em sua extensão é recoberta por material resinado, permitindo um deslizamento suave sobre a prancha num sistema rolante, isto é, rola sobre si mesma, fazendo com que a prancha se desloque no mesmo sentido em que gira o material resinado, transportando consigo o que estiver sobreposto.”

■ Peso aproximado: 3,650 kg

# UTILIZAÇÃO



Centro Obstétrico



Centro Cirúrgico



UTIs



Unidades de Internação



Unidades de Imagem



Manobras em desníveis



## ■ LIMPEZA

- álcool 70%;
- escova com sabão neutro;
- sob consulta à CCIH.



## ■ ARMAZENAMENTO

- Quando não estiver em uso, o PASSANTE® poderá ser pendurado pelas alças em local visível aos demais usuários;
- No almoxarifado, empilhamento máximo = 4 caixas.

## ■ PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar o PASSANTE®, leia atentamente as instruções de manobras e visualize o vídeo que acompanha o produto.
- Todas as instruções estão também disponíveis no site [www.passante.com.br](http://www.passante.com.br).

**REGISTRO NO MS : 80390189001**



**ergho** - Produtos para a Ergonomia Hospitalar

Jacyra Alves Marques - EPP

Rua Carlos Fatuto, 160 - Box 10 - Jardim do Bosque - LEME - SP CEP:13.613-110

Fone/Fax : (19) 3572-2009 / 3572-1455 / 3572-2355

[www.passante.com.br](http://www.passante.com.br) - [yesoliveira@uol.com.br](mailto:yesoliveira@uol.com.br)